

Dentapreg® MESH

Dentapreg® MESH je kompatibilní nejen s teplem tvrditelnými pryskřicemi, ale i vytvrzovanými za laboratorní teploty a proto je možné jej použít i na opravy snímatelných náhrad.

Návod k použití

VYZTUŽENÍ
SNÍMATELNÉ NÁHRADY

1) Připravte sádrový model a fixujte jej do kyvety.



2) Vyjměte sítku Dentapreg® MESH ze sáčku, umístěte ji na přiložený silikonový papír a vložte do pícky předehřáté na 140 °C / 290 °F. Vyjměte po 90 sekundách. Místo pícky lze použít i žehlička. Sítku uloženou mezi vrstvami silikonovaného papíru přezehlete po dobu 5-10 vteřin. Sítka se stane tvarovatelnou.



3) Po přezhlení vyjměte sítku co nejdříve ze silikonovaného papíru a ihned ji natvarujte na sádrový model. Počkejte až sítko vychladne. Po vychladnutí zůstane sítko natvarované.



4) Pomocí nůžek obstrihněte sítku do požadovaného tvaru.




* tvar sítky pro snímatelnou náhradu na spodní čelist.




5) Aplikujte vrstvu pryskyřičného těsta do horní části kyvety, ve které máte zuby.

6) Překryjte sádrový model transparentní fólií, který je součástí balení.

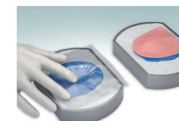


7) Zavřete kyvetu.


8) Vložte kyvetu do lisu. Slisujte, ale ne naplno. Pouze tak, aby vrstva těsta vylézající z kyvety měla tloušťku cca. 1-2 mm.

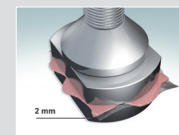

- 9) Hned po slisování vyjměte kyvetu z lisu, otevřete ji a fólii vyjměte.

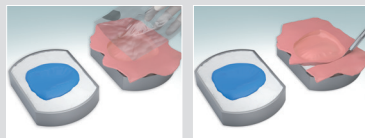

- 10) Pokryjte sádrový model tenkou vrstvou pryskyřičného těsta, které vám přebývá v horní části kyvetu.

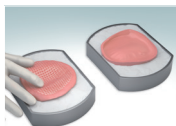


- 11) Umístěte natvarovanou sítku do této vrstvy těsta a opět uzavřete kyvetu. Síťka Dentapreg® MESH musí být kompletně podložena pryskyřičným těstem.

- 12) Kyvetu znovu uzavřete, vložte do lisu a slisujte.



- 13) Polymerujte pryskyřičné těsto podle návodu výrobce.

- 14) Vyjměte vychladlou náhradu z kyvetu a opravujte ji běžným způsobem.

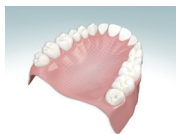

Základní popis:

Zdravotnický prostředek (ZP) Dentapreg® MESH je zpevňující materiál využívaný v oblasti protetické stomatologie. Jedná se o sítku tvořenou spleťnými skleněnými vlákny s povrchovou úpravou, která jsou impregnována akrylátovou polymerní matricí.

Určené účely použití:

Zdravotnický prostředek Dentapreg® MESH je určen k vyztužení a opravám částečných i celkových snímatelných akrylátových zubních náhrad.

Kontraindikace:

Ve vzácných případech může použití ZP souviset se vznikem alergické reakce. Použití ZP Dentapreg® je kontraindikováno u pacientů, u nichž je známá citlivost na některou ze složek, kterou produkty Dentapreg® obsahují (zejména metakrylátové monomery a polymery).

Bezpečnostní opatření:

- Při manipulaci s výtuzí je doporučeno používat latexové či nitrilové nepudované rukavice.

- Výtuz musí být kompletně pokryta akrylátovou pryskyřicí.

- Při práci se zdroji tepelné energie (pícka, žehlička, polymerátor) dbejte zvýšené opatrnosti.

- Informujte pacienta, že v případě mechanického selhání (delaminace, fraktura, odhalení vyztužujících vláken apod.) není možno náhradu dále používat, aby nedošlo k poškození měkkých tkání.

- Informujte pacienta o nutnosti striktního dodržování hygienických zásad.

- Informujte pacienta, že v případě projevu alergické reakce či jiného biologického účinku je třeba bez odkladu vyhledat lékařskou pomoc.

- Při přípravě, vytváření a opravování pryskyřičné báze zubní náhrady vždy postupujte v souladu s instrukcemi definovanými návodem k použití daného výrobce.

- Informujte pacienta, že v případě výskytu jakékoli závažné nežádoucí příhody je třeba bezodkladně informovat ošetřujícího lékaře, výrobce a příslušné regulační orgány pro zdravotnické prostředky.

Důležitá upozornění:

- Produkt nepoužívejte v případě, že uplynula doba expirace.

- Produkt není určen k vícenásobnému použití.

- Produkt nepoužívejte v případě, že došlo k jeho kontaminaci či jinému poškození.

- Produkt nepoužívejte v případě, že je jeho ochranný obal jakkoli poškozen.

- Před vyhozením do odpadu produkt znehodnoťte. Zajistěte svoz odpadu certifikovanou firmou.

- Cílová skupina pacientů není omezena a odpovídá prevalenci postižení.

Údaje o kompatibilitě:

ZP Dentapreg® MESH je kompatibilní s akrylátovými pryskyřicemi určenými ke zhotovování bází a opravám celkových i částečných snímatelných zubních náhrad. Produkt je kompatibilní s pryskyřicemi vytvářenými radikálovou polymerací (teplem tvrditelné pryskyřice i pryskyřice vytvářené za laboratorní teploty).

Skladování:

ZP Dentapreg® MESH může být dlouhodobě skladován při teplotách v rozmezí 4–25 °C v neporušeném primárním obalu mimo působení přímých světelných zdrojů. Nevystavujte dlouhodobě teplotám vyšším než 25 °C. Expirace je 3 roky od data výroby. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na obalu.

Doplňující informace:

Produkt je určen výlučně k použití zubním technikem. Používejte vždy v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu k použití a v souladu s definovanými určenými účely použití. ADM, a.s. nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé kvůli nedodržení předepsaného postupu aplikace či použití mimo stanovený indikační rozsah. Seznamte se se složením produktu, bezpečnostními listy, které jsou k dispozici na adrese dentapreg.com a u dodavatele zdravotnického prostředku.

Výrobce

ADM, a.s., U Vodárny 2, 616 00 Brno, Czech Republic
www.dentapreg.com

Poslední úprava:

červenec 2024

